

# Laveurs-désinfecteurs validés



## AVERTISSEMENT

Les processus de nettoyage décrits dans ces instructions ont été validés par Intuitive. Tout autre processus de nettoyage peut entraîner un retraitement incomplet, ce qui peut occasionner des blessures au patient.



## REMARQUE

- Le tableau ci-dessous présente des exemples de fabricants et de modèles de laveurs-désinfecteurs qui ont été validés conformément à la norme ISO 15883-1. Veuillez contacter le fabricant du laveur-désinfecteur pour recevoir la liste actuelle des modèles validés compatibles avec les instruments da Vinci.
- Utilisez uniquement un laveur-désinfecteur dont l'efficacité a été validée conformément à la norme ISO 15883-1.
- L'hôpital doit valider l'efficacité de son processus de nettoyage si la réglementation nationale l'exige.
- Suivez les instructions fournies par le fabricant du laveur-désinfecteur.
- Utilisez uniquement un nettoyant de pH neutre à alcalin doux (pH 7-11) compatible avec le laveur-désinfecteur spécifique.

FABRICANT	MODÈLE	FAMILLES DE PRODUITS VALIDÉS	CYCLE
Atherton	Platypus IQ6	Instruments de 8 mm Instruments Single-Site Staplers Endoscopes Caméra portative et accessoires Accessoires (Groupes 1, 2 et 3)	Utilisez le cycle de lavage recommandé par le fabricant.  Pour les instruments, utilisez le module de lavage du fabricant à raccorder aux ports d'irrigation des instruments.  Pour les endoscopes, utilisez le panier (PN 400498) et le jeu de connecteurs (PN 400482) validés.  Pour la caméra portative, utilisez le panier validé (PN 400499).
Belimed	WD 290 WD 290 IQ		
Geringe	8668 88 Turbo		
KEN	IQ6		
Matachana	LD1000		
Miele	PG 8528		
Skytron	Sterling P1800		

(suite)

# Laveurs-désinfecteurs validés

FABRICANT	MODÈLE	FAMILLES DE PRODUITS VALIDÉS	CYCLE
Steelco	DS 1000 Series DS 600 Series DS 610 Series PWD 8626 PWD 8628 TW 3000/2	Instruments de 8 mm Instruments Single-Site Staplers Endoscopes Caméra portative et accessoires Accessoires (Groupes 1, 2 et 3)	Utilisez le cycle de lavage recommandé par le fabricant.  Pour les instruments, utilisez le module de lavage du fabricant à raccorder aux ports d'irrigation des instruments.  Pour les endoscopes, utilisez le panier (PN 400498) et le jeu de connecteurs (PN 400482) validés.  Pour la caméra portative, utilisez le panier validé (PN 400499).
STERIS	Reliance Vision		
Atherton	Platypus IQ5	Instruments de 8 mm Instruments Single-Site Staplers Caméra portative et accessoires Accessoires (Groupes 1, 2 et 3)	
Ken	IQ5		
Matachana	LD500		
Skytron	Sterling P1500		
MMM	Uniclean PL II	Instruments de 8 mm Staplers Endoscopes Caméra portative et accessoires Accessoires (Groupes 1, 2 et 3)	
SMEG	WD7015 WD7015T	Instruments de 8 mm Endoscopes Caméra portative et accessoires Accessoires (Groupes 1, 2 et 3)	
Medisafe	SI PCF Niagara SI PCF	Instruments de 8 mm Instruments Single-Site Staplers Accessoires (Groupes 1 et 2)	
Steelco	US 300	Instruments de 8 mm Staplers Accessoires (Groupes 1 et 2)	
STERIS	AMSCO 7052HP AMSCO 7053HP	Instruments de 8 mm Accessoires (Groupes 1 et 2)	