
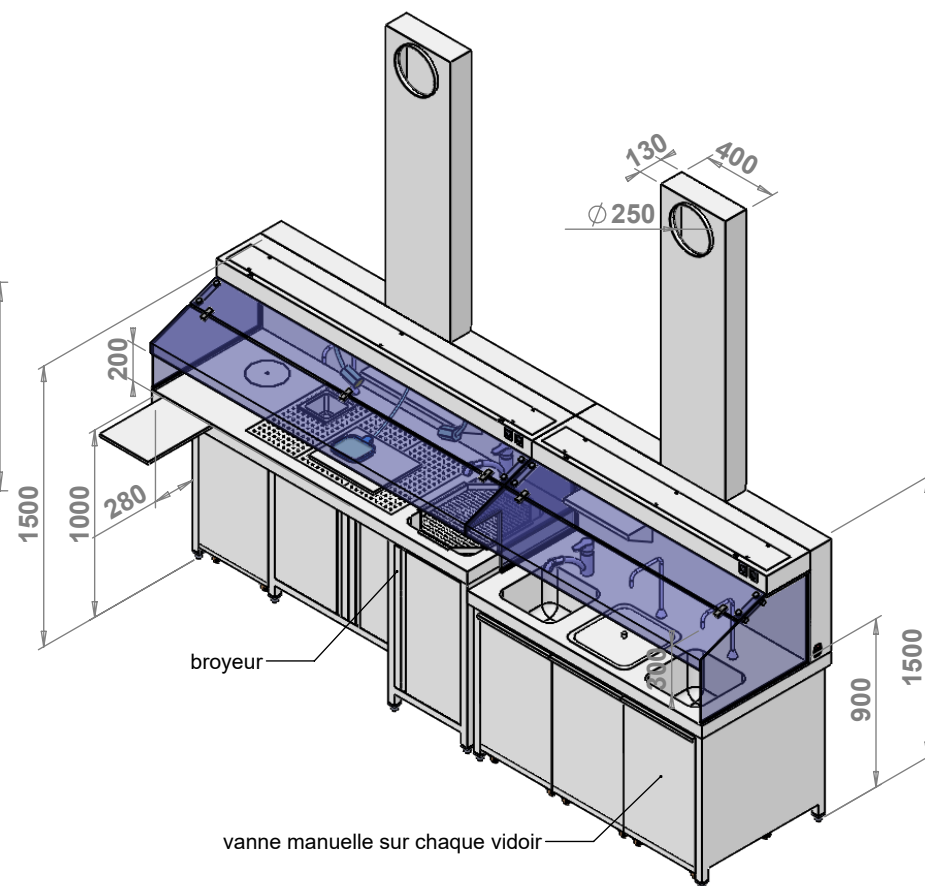


ENSEMBLE TABLE DE MACROSCOPIE ET POSTE DE VIDANGE

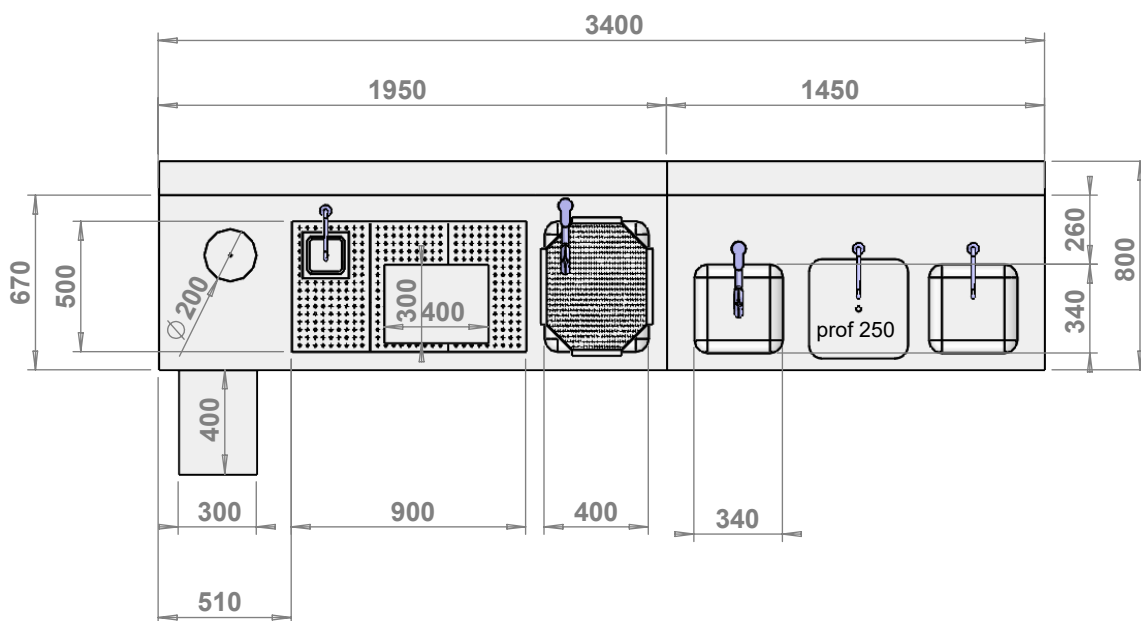

ATTENTES A PREVOIR POUR LA TABLE DE MACROSCOPIE

Alim électrique 220V 50Hz 16A

Extraction 1000m³/h avec commutateur Petite vitesse/ Grande vitesse (non fournis)

Petite vitesse : 100m³/h (non utilisation du poste)

Grande vitesse 1000m³/h (utilisation du poste) vitesse frontale de 0,5 m/s

Perte de charge :150 Pa

Raccordement sur piquage diam 250 mm

Connexion sur réseau d'extraction avec piquage en attente à proximité dans le faux plafond

Le carottage d'un mur , les travaux d'étanchéité , eventuels sont à la charge du client

Compensation air neuf à assujettir au débit d'air extrait

ATTENTES A PREVOIR POUR LE POSTE DE VIDANGE

Alim électrique 220V 50Hz 16A

Arrivées EC/EF 15/21avec vannes d'arrêt 1/4 tour et clapets anti retour

Pression 3 à 5 bars

Evacuation diam 50 mm

Extraction 1000m³/h avec commutateur Petite vitesse/ Grande vitesse (non fournis)

Petite vitesse : 100m³/h (non utilisation du poste)

Grande vitesse 1000m³/h (utilisation du poste) vitesse frontale de 0,5 m/s

Perte de charge :150 Pa

Raccordement sur piquage diam 250 mm

Connexion sur réseau d'extraction avec piquage en attente à proximité dans le faux plafond

Le carottage d'un mur , les travaux d'étanchéité , eventuels sont à la charge du client

Compensation air neuf à assujettir au débit d'air extrait