



PROCEDURE MAINTENANCE PREVENTIVE POUR CABINE DE LAVAGE

MAINTENANCE	VALIDATION DU CONTROLE
Nettoyage filtres intérieurs chambre	
Contrôle et nettoyage filtres sur arrivée d'eau	
Contrôle sondes de température	
Contrôle des thermostats de sécurité	
Contrôles fuites et resserrage des durites (changement si nécessaire)	
Contrôles des connexions électriques, resserrage sur les borniers	
Contrôle du pressostat de pression pompe lavage (changement si nécessaire)	
Contrôle doseur détergent (remplacement si nécessaire)	
Contrôle des volume pris et flotteurs bacs	
Contrôle et nettoyage des buses de lavage	
Contrôle pompe de lavage	
Contrôle des vannes de remplissage	
Contrôle des batteries tampon du PLC et écran	
Contrôle vanne de vidange	
Contrôle tuyaux produits	
Contrôle des résistances de séchage	
Contrôles des sécurités des portes	
Contrôles des accessoires (chariots, connexion module de lavage)	
Nettoyage de la chambre	
Essais cycle	
Consignation du carnet de maintenance	
	Fréquence de changement Des pièces
Remplacement pré filtre à air sur séchage	1 fois / an
Contrôle des débitmètres (remplacement si nécessaire)	1 fois /an ou 1000 cycles Max
Remplacement des joints de porte	1000 cycles max
Changement des flexibles des pompes (si nécessaire suivant modèle de pompe)	1000 cycles max

***Toutes pièces reconnue défectueuse pendant les contrôles sera remplacée en accord avec le client**