



IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS

REP	DESIGNATION	DIMENSIONS LxIxH (mm)	MASSE (kg)
1	AIMANT	1938x2450x2400	4553
2	TABLE PATIENT FIXE (PT)	2158x572x965	136
3	CONTRE-LIT	853x510x956	66
4	BOITIER DE CHUTE DE CHAMP (MRU)	287x206x172	3.2
5	MEUBLE ANTENNES (NON FOURNI PAR GE)	650x600x1200	-
6	ARMOIRE SYSTEME (ISC)	1275x974.5x2000	1120
7	PANNEAU DE PENETRATION (PP)	255x243x723	-
8	ARMOIRE DE REROIDISSEMENT (ICC)	902x801x2048	570
9	ARMOIRE ELECTRIQUE DE DISTRIBUTION (MDP)	216x508x914	43.5
10	BOITIER DE CONTROLE AIMANT (MON)	381x260x127	4.5
11	CONSOLE OPERATEUR (GOC)	-	59.3
12	CAMERA CCTV (NON FOURNI PAR GE)	-	-
13	ECRAN POUR CAMERA CCTV (NON FOURNI PAR GE)	-	-

	MUR - SELON LES DESSINS RECUS
	MUR - MODIFICATIONS RECOMMANDEES PAR GE
	MUR A DEMOLIR
	CAGE RF - ATTENUATION DE 100 dB

HAUTEUR DE LA SALLE D'EXAMEN	
HAUTEUR SOL A DALLE	3.38 m
HAUTEUR FAUX PLAFOND	2.90 m

REMARQUES

- A) Accès de l'aimant, ouverture au toit 3000x3000 mm
- B) Panneaux démontables
- C) Attention ! Ligne de 5 Gauss en dehors des limites de la salle de l'aimant
- D) Porte modifiée.