




Procéder au transfert tout en maintenant une main sur le cintre/berceau afin d'arrêter tout balancement excessif et de procurer au patient un sentiment de sécurité accrue.

**ATTENTION :** Ne pas essayer de tirer le lève-personne le long du rail à l'aide du fil de la télécommande. Cela risque d'endommager le câble et de finalement provoquer le dysfonctionnement de la télécommande.

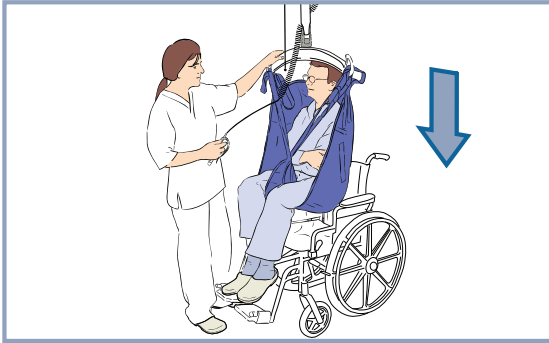

Dès que le patient est arrivé à destination, l'abaisser à son nouvel emplacement.

**AVERTISSEMENT :** Lorsque la fonction de descente est utilisée, faire attention à ne pas heurter le patient avec le cintre/berceau mobile, ce qui pourrait occasionner des blessures.

Utiliser, au besoin, les poignées situées au dos du harnais pour positionner le patient lors du transfert dans un fauteuil. Tenir fermement la poignée afin d'assurer une position assise adéquate.



Lorsque le poids du patient est complètement soutenu, détacher les boucles de fixation des jambières, puis celles des épaules. Éloigner le lève-personne du patient.

Retirer le harnais de derrière le patient.

Charger les batteries selon le système de chargement MS2 équipé.